

# Guide rapide nettoyage

# Patent

Nettoyage de la trousse chirurgicale



1 Apporter la trousse chirurgicale à la stérilisation



2 Nettoyer correctement les forets utilisés



3 Placer tous les forets dans le liquide de nettoyage



4 Placer également le bol en métal dans le liquide




5 Placer également le bol en métal dans le liquide



6 Mettre le couvercle dans le liquide



7 Le couvercle doit être recouvert de liquide

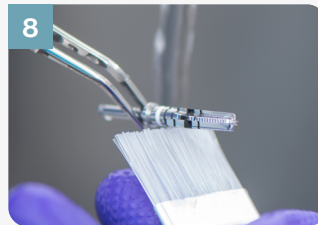

8 Nettoyer les forets avec une brosse



9 Sécher les forets



10 Poser les forets sur un chiffon sec



11 Replacer toutes les pièces dans la trousse chirurgicale



12 Emballer la trousse chirurgicale pour la stériliser



13 Fermer le sachet de manière étanche



14 Mettre dans le stérilisateur



15 Démarrer le programme de stérilisation



# Montage du kit chirurgical

