

Gyors útmutató Tisztítás

Patent



1 Vigye a sebészi készletet fertőtlenítő helyiségbe



2 Állítsa fel a használt fúrókat és tisztítsa meg alaposan



3 Helyezze az összes fúrót a tisztítófolyadékba



4 Minden fúrót teljesen el kell fedjen a folyadék




5 A fémtálat is tegye a folyadékba



6 Tegye a fedelet a folyadékba



7 A fedelet teljesen el kell fedje a folyadék

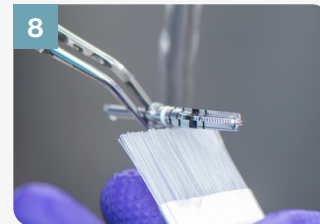

8 Tisztítsa meg a fúrókat egy kefével



9 Szárítsa meg a fúrókat



10 Tegye a fúrókat egy száraz ruhára



11 Helyezze az összes alkatrészt a sebészi készletbe



12 Csomagolja be a sterilizáláshoz



13 Hegessze össze légmentesen



14 Tegye a sterilizálóba



15 Indítsa el a sterilizálási programot



A Sebészi Készlet felszerelése

