


Guia Rápido de Limpeza e Esterilização

Patent 



1
Levar o kit cirúrgico para a sala de esterilização

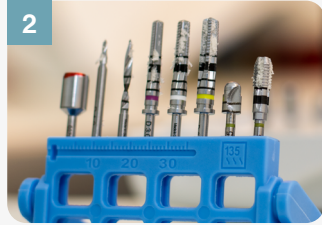

2
Preparar as brocas usadas e limpá-las adequadamente



3
Colocar todas as brocas no líquido de limpeza



4
Todas as brocas têm de estar completamente cobertas por líquido




5
Coloque a tigela metálica no mesmo líquido



6
Coloque o prato no líquido



7
O prato deverá estar coberto de líquido

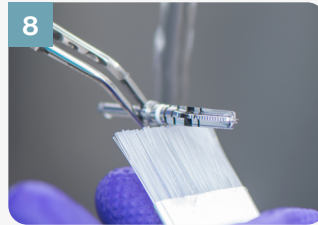

8
Limpar as brocas com uma escova



9
Secar as brocas



10
Colocar as brocas num pano seco



11
Colocar todos os instrumentos no kit



12
Colocar o kit dentro de uma bolsa de esterilização



13
Selar a bolsa de esterilização



14
Colocar no equipamento de esterilização



15
Iniciar o programa de esterilização



Montagem do kit cirúrgico

